

Артелак® Всплеск Уно

Гиалуроновая кислота 0,2%

**Регистрационное удостоверение № РЗН
2013/1204 от 16.03.2015****Раствор увлажняющий
офтальмологический**

- **Кристалльно чистый увлажняющий офтальмологический раствор**
- **Не содержит консервантов**
- **Содержит гиалуроновую кислоту – натуральный полимер, который входит в состав естественной слезной пленки здорового глаза человека**
- **Применяется для предварительного и последующего увлажнения мягких и жестких контактных линз во время их ношения**
- **Легко применяется, хорошо переносится и безопасен**

Состав

Артелак® Всплеск Уно содержит:

Гиалуроновую кислоту в виде натриевой соли (натрия гиалуронат) 0,2 %, калия хлорид, натрия хлорид, динатрия фосфат додекагидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, вода для инъекций.

Область применения

Для интенсивного и длительного увлажнения передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы):

- при сухости глаз, вызванной образом жизни, стрессовыми нагрузками на глаза, воздействием факторов окружающей среды, таких как длительная работа за компьютером, и, как следствие, редкое моргание, пребывание в помещении с кондиционированным воздухом, сигаретный дым, а также воздействие ветра при пребывании вне помещения.
- при выраженной сухости глаз, вызванной системными заболеваниями, оперативными вмешательствами на глазу или приемом некоторых лекарственных препаратов, таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бета-блокаторы, спазмолитики, диуретики.

– Для устранения дискомфорта при ношении жестких и мягких контактных линз.

Свойства

Артелак® Всплеск Уно представляет собой стерильный 0,2 % раствор натрия гиалуроната, не содержащий консервантов, в одноразовых тубик-капельницах.

Входящая в состав Артелак® Всплеск Уно гиалуроновая кислота (натрия гиалуронат) является природным увлажняющим веществом с высокой способностью связываться с водой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав раствора (местные аллергические реакции, возникающие в редких случаях). В таких случаях следует прекратить применение препарата.

Дозы и способ применения

Артелак® Всплеск Уно не содержит консервантов. Рекомендуется закапывать Артелак® Всплеск Уно в конъюнктивальный мешок каждого глаза по 1 капле по мере необходимости.

На иллюстрациях показано, как просто и легко использовать Артелак® Всплеск Уно.


1. Отделить тубик-капельницу для одноразового применения, удерживая ее за отметку.



2. Открутить верхний наконечник тубик-капельницы.



3. Слегка запрокинуть голову назад, оттянуть нижнее веко вниз пальцем свободной руки. Удерживая тюбик-капельницу как можно более вертикально, наконечником вниз, в направлении глаза, осторожно выдавить одну каплю.

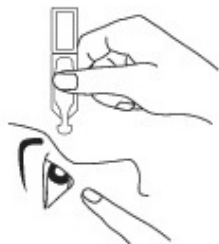

После этого закрыть глаз, поводить из стороны в сторону и несколько раз моргнуть, чтобы капли равномерно распределились по поверхности глаза. Избегайте контакта наконечника тюбик-капельницы с глазами или его касания пальцами, чтобы не допустить возможного попадания загрязнений в раствор.

Дополнительные сведения к обозначениям на упаковке:



Производитель:

«Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ», Германия, Брунсбюттелер Дамм 165-173, 13581 Берлин / «Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH», Brunsbuetteleer Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany.



Хранить при температуре от +1 °С до +25 °С



Тюбик-капельницу с разовой дозой следует использовать только один раз



Не использовать препарат в случае повреждения тюбик-капельницы!



Номер серии



Следуйте инструкциям по применению!



Стерильно, изготовлено в асептических условиях



Срок годности в закрытой оригинальной упаковке



Знак наличия сертификата соответствия в Евросоюзе

Рекомендации при ношении контактных линз

При ношении мягких и жестких контактных линз можно закапывать Артелак® Всплеск Уно в конъюнктивальный мешок глаза без снятия линз.

Взаимодействие с другими средствами

В случае совместного применения с офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 15 минут между закапыванием раствора Артелак® Всплеск Уно и применением глазных капель. Глазные мази всегда должны применяться после закапывания раствора Артелак® Всплеск Уно.

Форма выпуска

Артелак® Всплеск Уно выпускается в тюбик-капельницах для одноразового применения по 0,5 мл, 3 стрипа по 10 тюбик-капельниц или 1 стрип по 2 тюбик-капельницы вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре от +1 °С до +25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

В закрытой оригинальной упаковке - 2 года.

Артелак® Всплеск Уно не содержит консерванта и поэтому каждая упаковка для однократного применения может использоваться только один раз. Не следует использовать препарат Артелак® Всплеск Уно при повреждении упаковки препарата для однократного применения.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Получить дополнительную информацию, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по адресу

ООО «ВАЛЕАНТ»

Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5 тел/факс: +7 495 510 2879

Изделие медицинского назначения
«Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак® Всплеск Уно»

Артелак - зарегистрированная торговая марка фирмы Бауш & Ломб Инкорпорейтид или ее филиалов.

© Bausch & Lomb Incorporated.

P1RU02

41902PB764/4-RU